



INSTRUKCJA

Integracji InBody120 i InBody270 z
programem dietetycznym Aliant



Pracujesz na programie dietetycznym Aliant i posiadasz analizator składu ciała InBody120 lub InBody270?

Czy wiesz, że możesz przenieść dane pomiaru składu ciała swoich pacjentów do programu Aliant?

Zobacz instrukcję jak łatwo to zrobić:

1. Najpierw wejdź w Ustawienia programu LookinBody'120.

Lookin'Body120

Ustawienia

✓ Wybierz Użytkownika

Wyszukaj wg. Nazwy lub ID

Wyszukaj wg. daty badania

Wszystkie

Nowy Użytkownik

Wybierz Badanie

InBody Badanie

Zarządzaj Wynikami

Drukuj

E-mail

Edytuj

Użytkownik (Użytkownicy)

Nazwy Rosnąco

	Nazwa	ID	Wzrost (cm)	Wiek	Płeć	Profil	Raport Stanu Zdrowia	G e z
--	-------	----	-------------	------	------	--------	----------------------	-------------

Instrukcja Użytkownika

Najpierw wybierz użytkownika.


Po wybraniu użytkownika, można wybrać „Wybierz test” lub „Zarządzaj wynikami” w górnym menu.

Podłączanie...


[Rozwiązanie problemów](#)

Ver.LB120.3.0.1.7


2. Wybierz z drugiej grupy Test InBody podkategorię 05. Eksportuj dane jako plik CSV/Zdjęcie.

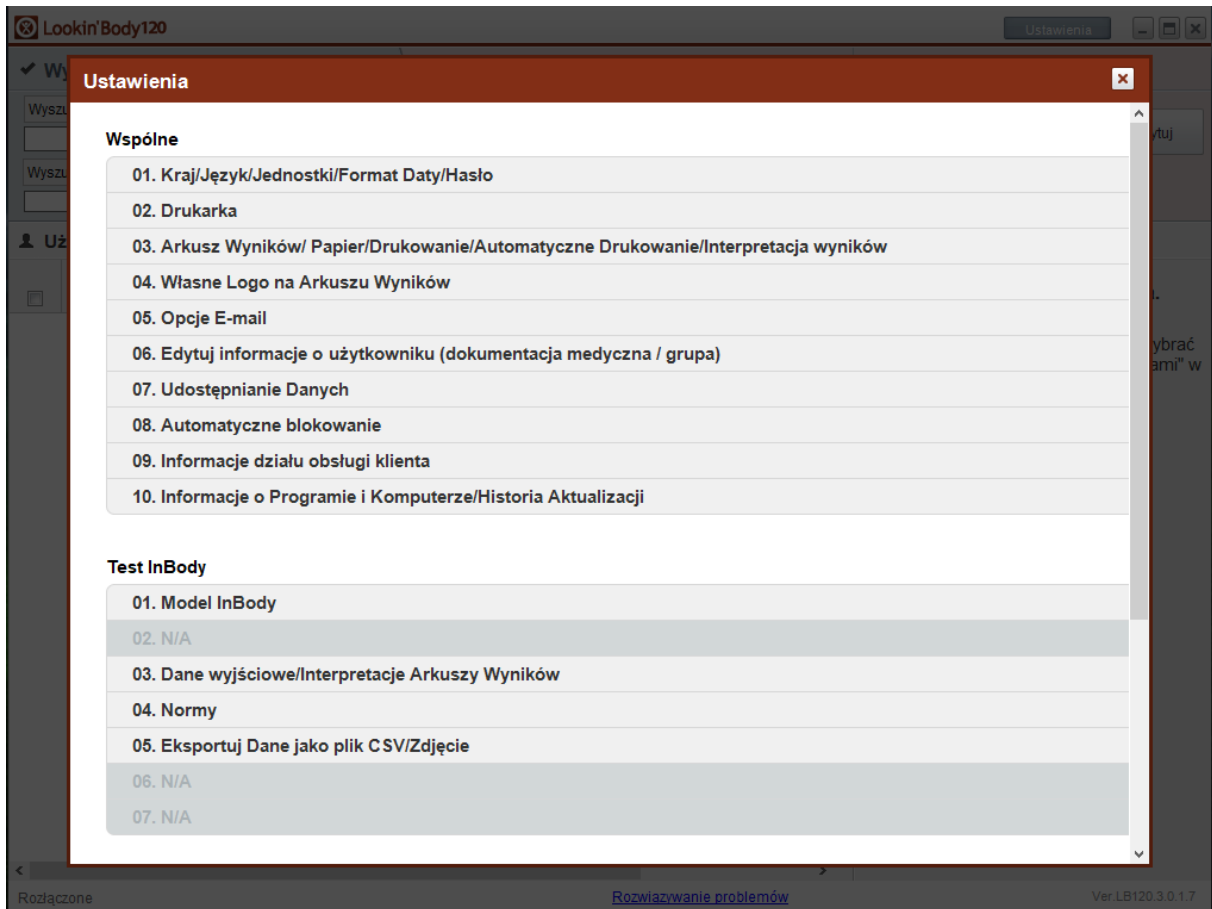


3. W prawej części kolejnego okna pod zapytaniem Konwertować wyniki automatycznie do pliku CSV po każdym Badaniu wybieramy Tak. Ewentualnie możemy również zmienić Folder Docelowy.

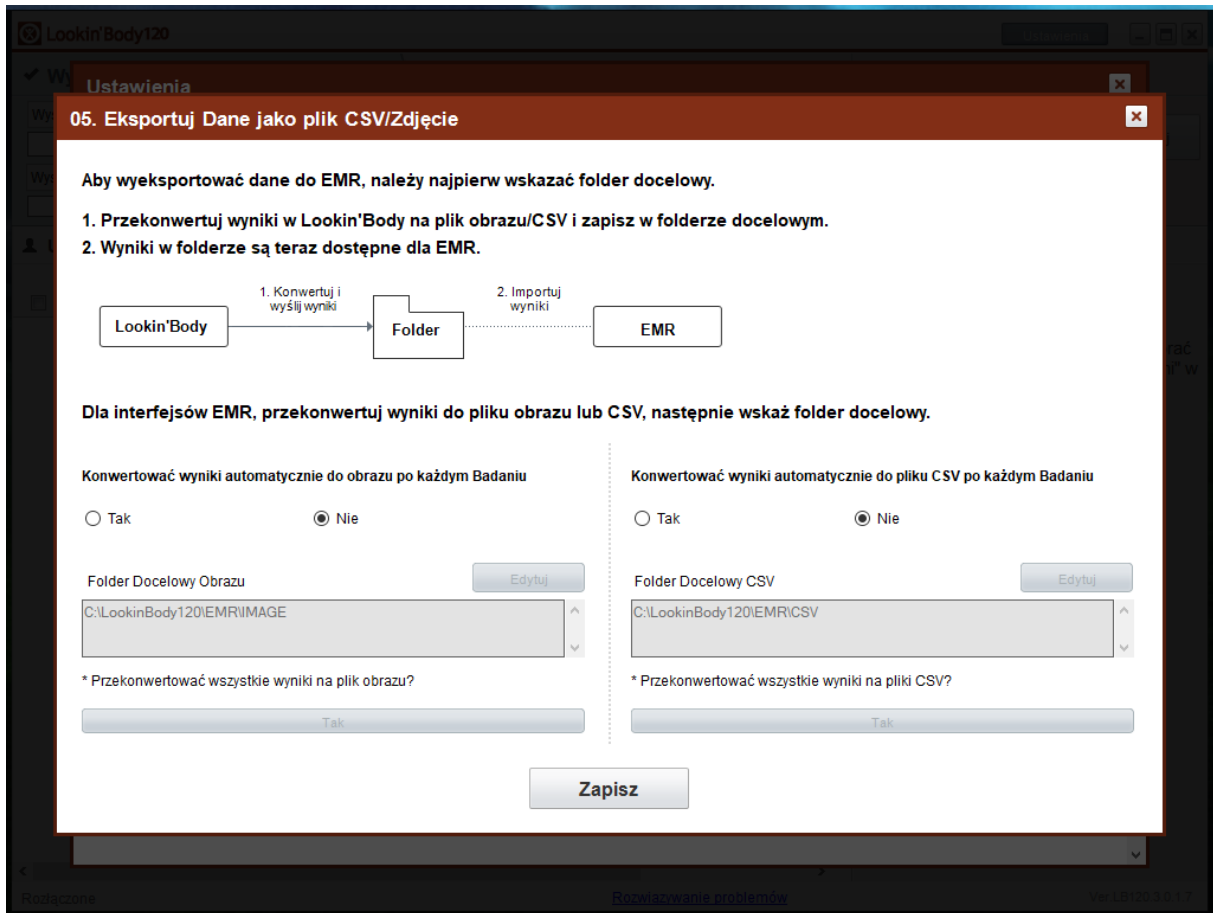


4. Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie przycisku Tak podświetlonego na prawym dolnym rogu okna dialogowego.

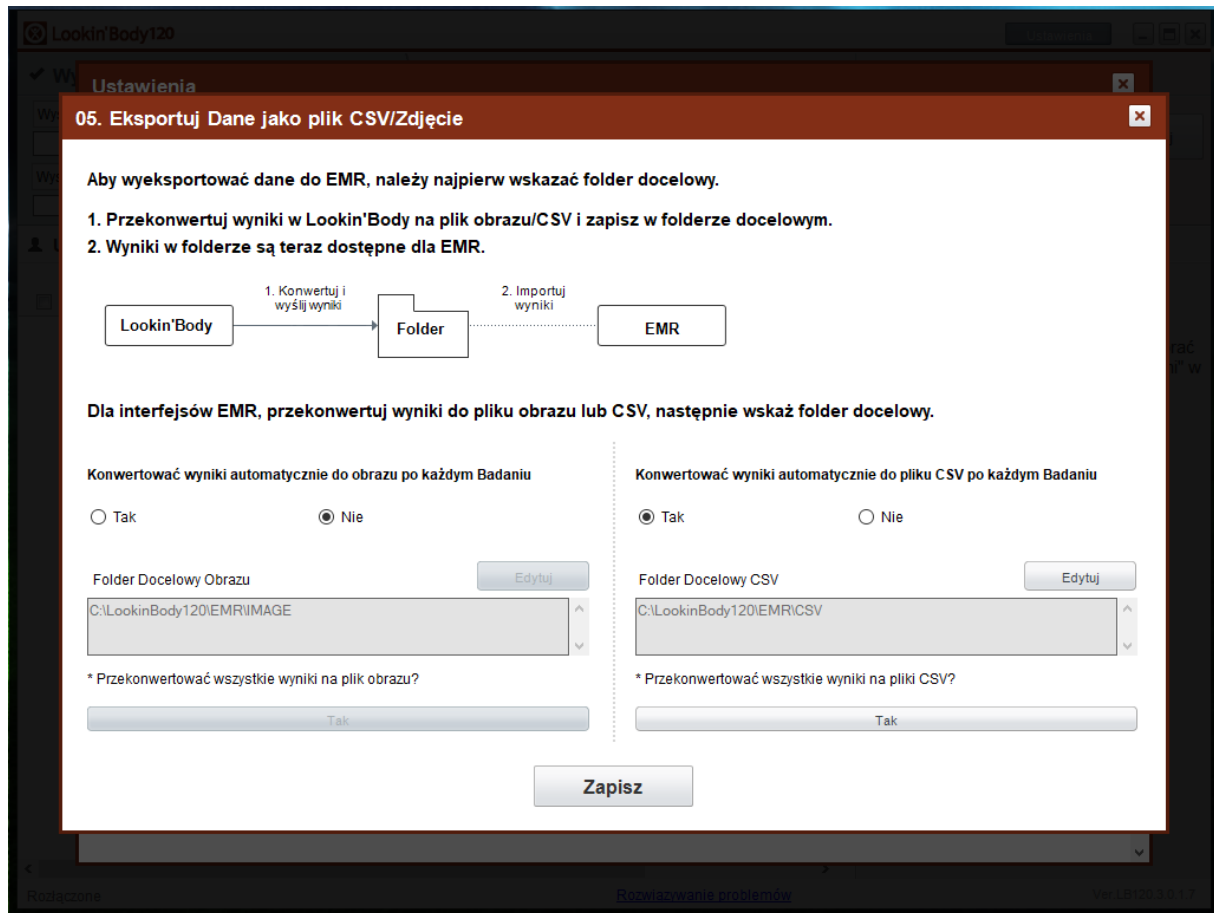


5. Teraz będziemy mieli wybór czy chcemy wyeksportować całość bazy danych czy tylko wybrany rekord. Jeżeli dokonaliśmy wyboru klikamy przycisk Zapisz.

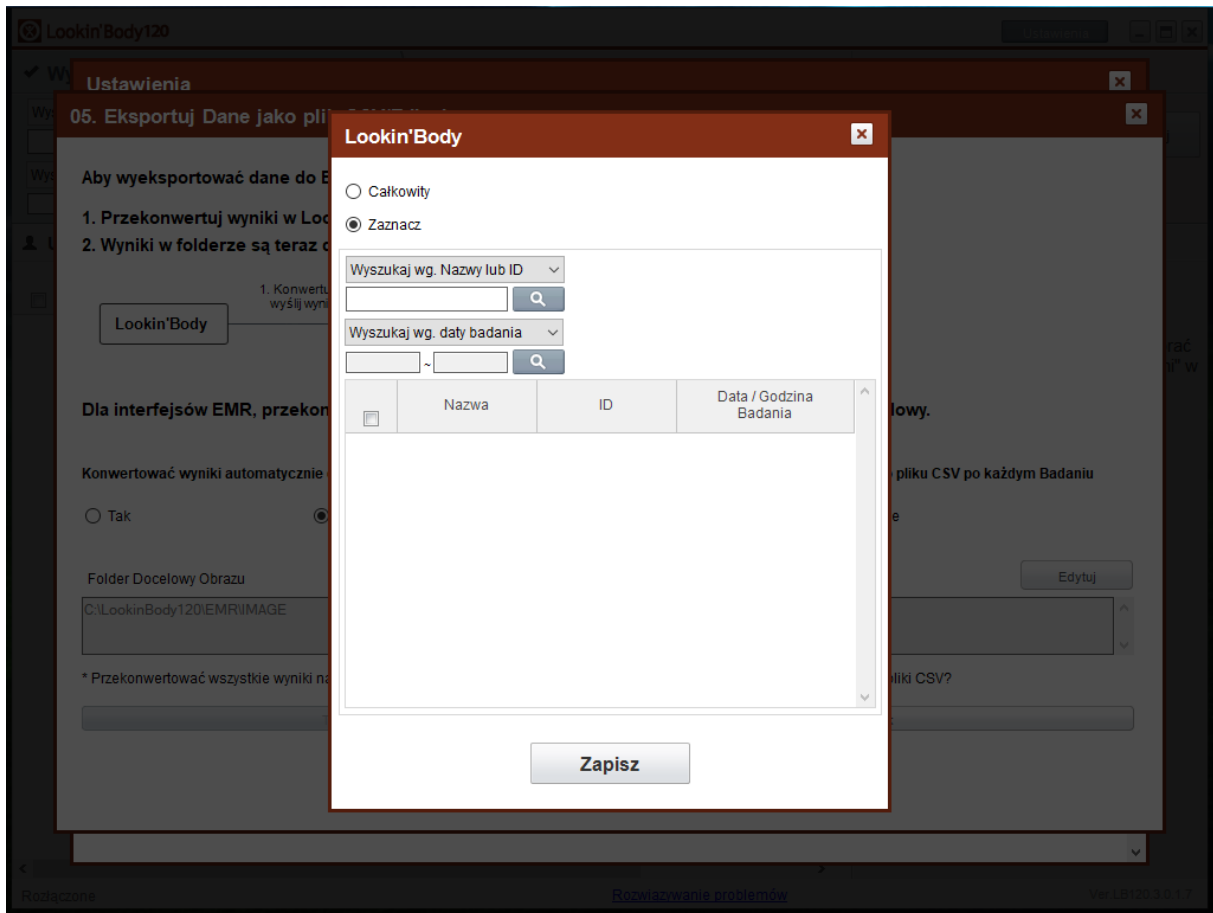

6. Gotowe, właśnie zapisaliśmy wyniki badań InBody do domyślnego folderu w formacie CSV.

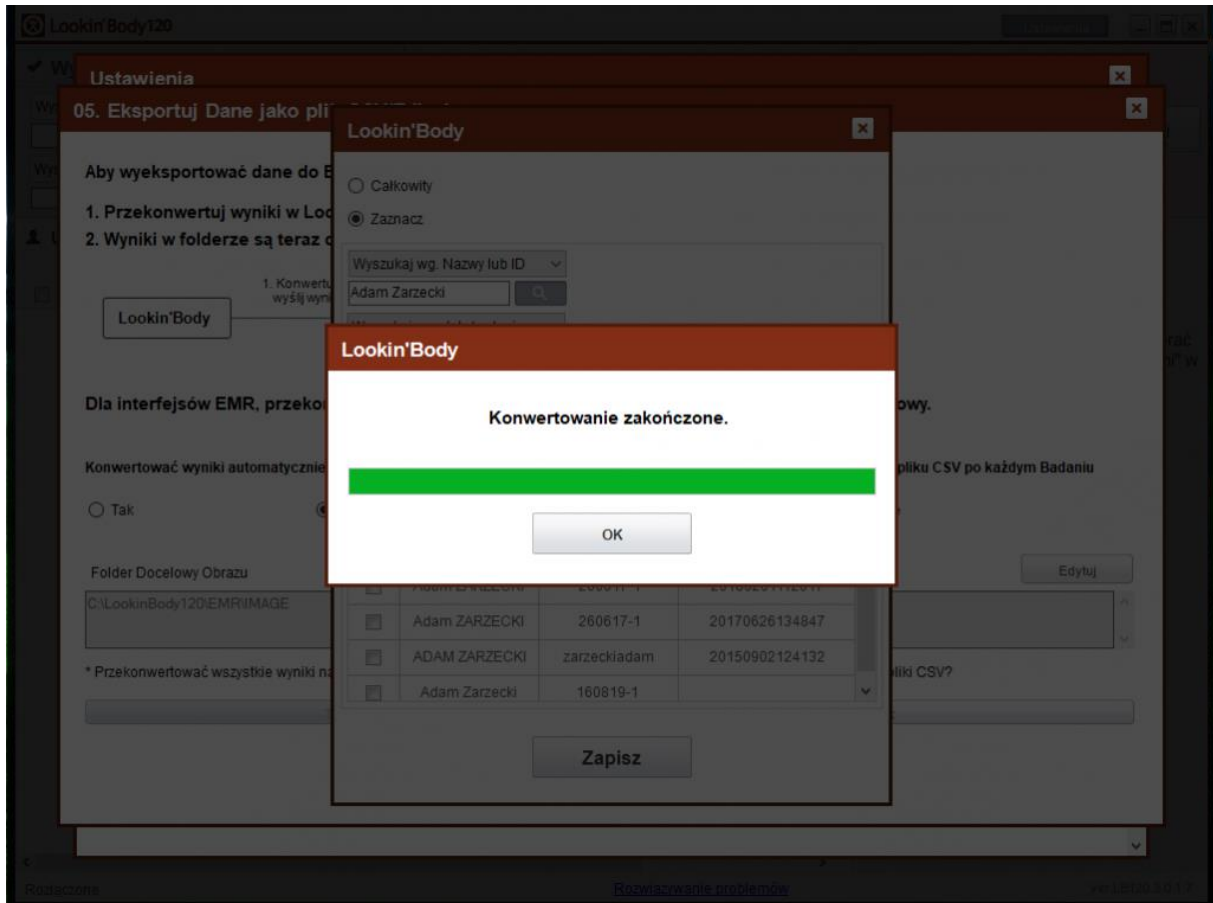


7. Jeżeli chcesz by wszystkie wyniki były zapisywane automatycznie w takim formacie na tym oknie dialogowym naciśnij przycisk Zapisz.

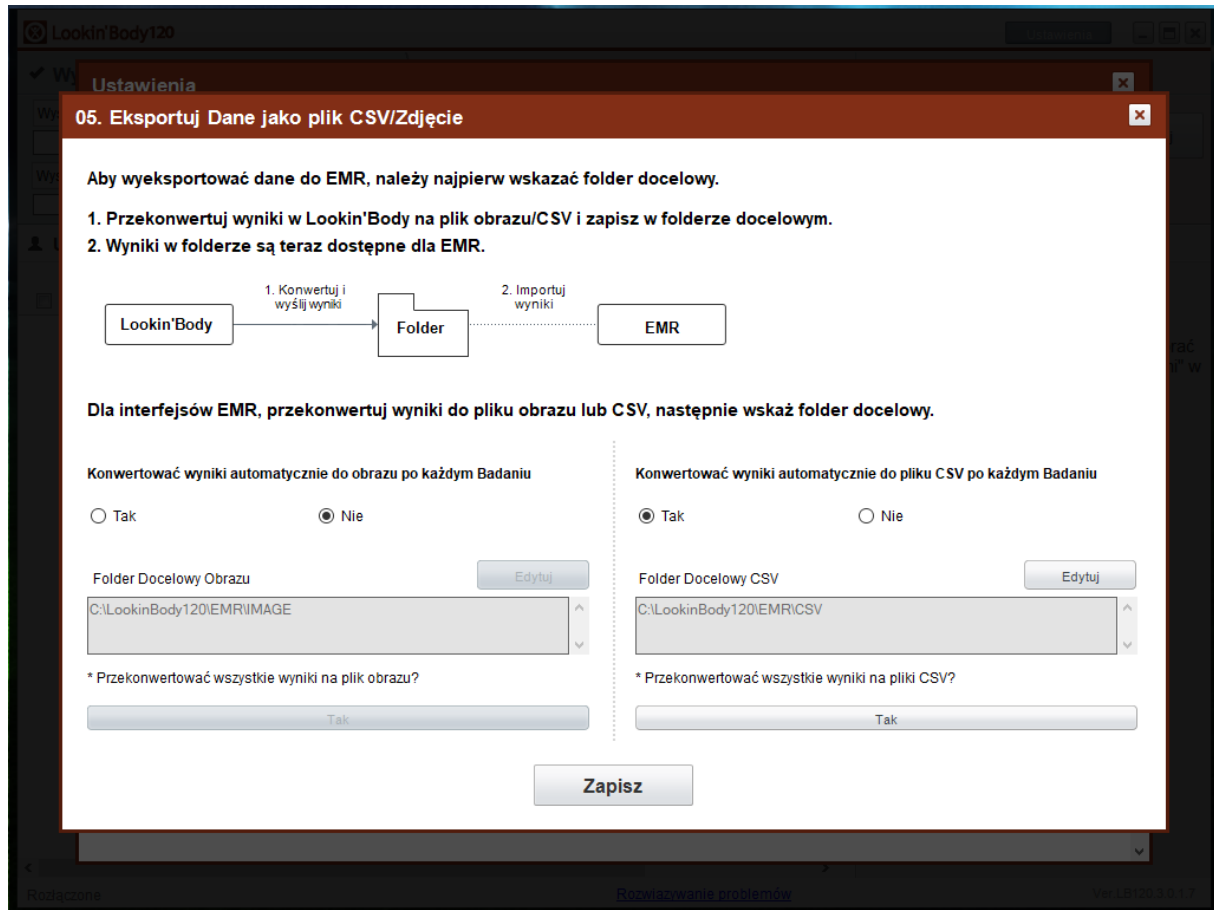

8. Następnie taki plik CSV po wgraniu go z poziomu programu dietetycznego Aliant pozwoli na zaimportowanie wyników badania InBody twojego pacjenta.

9. Wchodzisz do programu dietetycznego Aliant i wybierasz model analizatora InBody, który posiadasz.

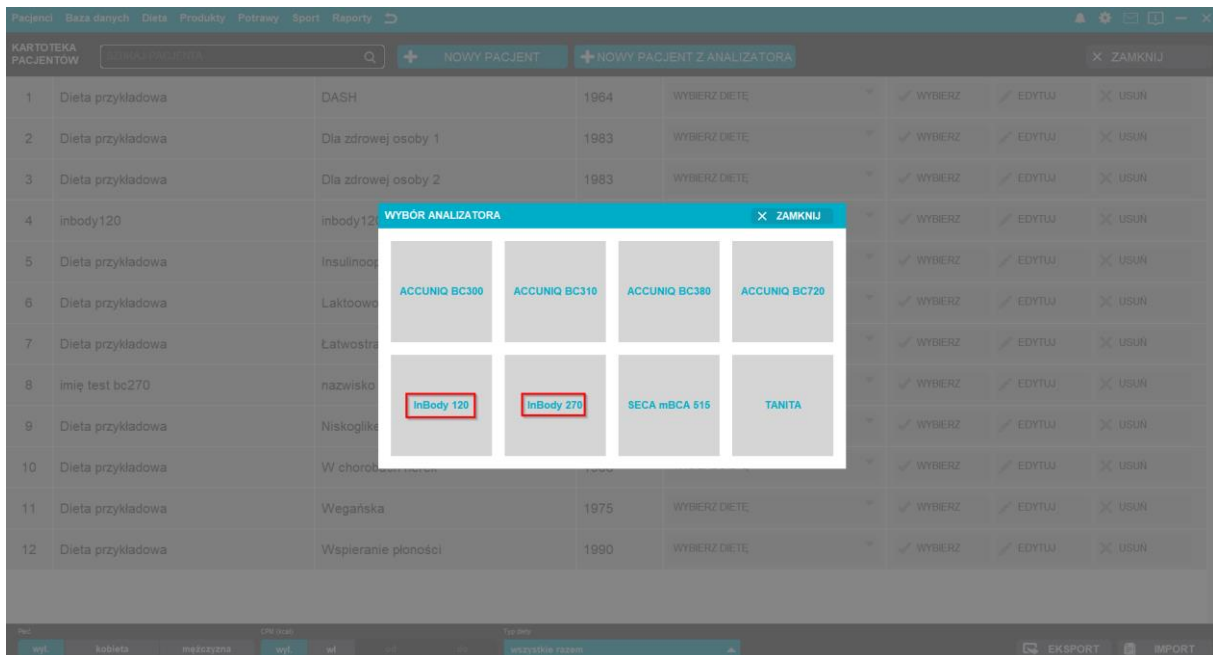

10. Importujesz dane wskazując na dysku wcześniej przygotowany plik csv. W zakładce ‘Badania’ odnajdziesz wyniki z analizatora InBody. Uzupełniasz brakujące informacje o pacjencie i zapisujesz zmiany.

EDYTUJ BADANIE X ZAMKNIJ			
Analiza składu ciała InBody 120			
LP.	NAZWA	WARTOŚĆ	OCENA
1	Beztłuszczowa masa ciała %	76.5	↑ ✓ ↓
2	Beztłuszczowa masa ciała kg	38.8	↑ ✓ ↓
3	BMI	21.1	↑ ✓ ↓
4	Całkowita ilość wody %	56.0	↑ ✓ ↓
5	Całkowita ilość wody l	28.4	↑ ✓ ↓
6	Ciśn. tętn. skurczowe [mmHg]		↑ ✓ ↓
7	Ciśn. tętn. rozkurczowe [mmHg]		↑ ✓ ↓
8	Ciśn. tętn. średnie [mmHg]		↑ ✓ ↓
9	Masa ciała kg	50.7	↑ ✓ ↓
10	Masa tkanki mięśniowej kg	21.2	↑ ✓ ↓
11	Masa tkanki tłuszczowej %	23.5	↑ ✓ ↓
12	Masa tkanki tłuszczowej kg	11.9	↑ ✓ ↓
13	Masa kości kg		↑ ✓ ↓
14	Physique rating		↑ ✓ ↓

DATA BADANIA 2019-09-02 ZAPISZ

test test
ZAMKNIJ I ODRZUĆ ZMIANY
ZAPISZ ZMIANY

O PACJENCIE
DIETA
ALERGENY
BADANIA
WIZYTY
TRENING

IMIE test	NAZWISKO test	DATA URODZENIA (RRRR-MM-DD) 1992-
TELEFON Podaj...	E-MAIL Podaj...	PŁEĆ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> KOBIETA MĘŻCZYŻNA </div>
CIEŻARNA / KARMIĄCA <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> N/D KARMIĄCA CIEŻARNA </div>	OKRES CIĄŻY <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> I TRYMESTR II TRYMESTR III TRYMESTR </div>	WIEK 31
WZROST 155	MASA CIAŁA (KG) 50.7	
TALIA (CM) 0	BIODRA (CM) 0	UWAGI

KONTO ONLINE
USUŃ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

1.2

1.5

2.4

OCENA MASY CIAŁA	BMI	WHR	WHR	RYZYKO CHOROŃ UKŁ. KRĄŻENIA	MASA NALEŻNA
	21.10	OK		NAJMNIJSZE	44.4 - 59.8

GOTOWE!